

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL
PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL
MIKROSKOPIS BTA
SIKLUS I TAHUN 2025**



**BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
MAKASSAR**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11 Makassar 90245
Telp. 0411 586457, 586458, 586270 Fax. 0411 586270
Email : pmebbllmakassar@gmail.com

BAHAN KONTROL

1. Bahan uji yang dikirim adalah 1 (satu) paket sediaan BTA yang terdiri dari 10 slide yang sudah diwarnai dengan pewarnaan Ziehl Neelsen.
2. Perhatikan petunjuk pelaksanaan ini dengan seksama agar diperoleh hasil yang baik dan benar.
3. Sebelum melakukan pemeriksaan, perhatikan terlebih dahulu kondisi seluruh sediaan.

I. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan metode pemeriksaan mikroskopis BTA menurut WHO dengan skala IUATLD.
2. Tanggal pelaksanaan pemeriksaan yaitu tanggal **20 – 23 Mei 2025**
3. **Mengisi form tanda terima bahan uji secara online** dengan cara login pada aplikasi website <https://simpler.bblkmakassar.com> (**maksimal 1x24 jam setelah bahan uji diterima**)

II. INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN DAN PENGISIAN HASIL ONLINE

1. Isilah terlebih dahulu tanggal penerimaan dan tanggal pemeriksaan serta ceklis kualitas bahan.

2. Lakukan pembacaan sediaan pada bagian tengah secara horizontal.
3. Isilah kolom hasil pemeriksaan mikroskopis dengan mengacu kepada skala *International Union Against Tuberculosis Lung Disease* (IUTLD)
 - Tidak ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang, pilih hasil **negatif**.
 - Ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang, pilih hasil **Scanty (cantumkan jumlah BTA)**.
 - Ditemukan 10-99 BTA dalam 100 lapang pandang, pilih hasil **1+**.
 - Ditemukan 1-10 BTA dalam 1 lapang pandang (minimal 50 lapang pandang), pilih hasil **2+**.
 - Ditemukan >10 BTA dalam 1 lapang pandang (minimal 20 lapang pandang), pilih hasil **3+**.
4. Teliti apakah hasil telah diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan dan cara pengisiannya sudah benar.
5. Komentar/saran disediakan untuk memberikan keterangan mengenai pelaksanaan program ini, seperti kesulitan/hambatan pelaksanaan, kondisi bahan uji, dan sebagainya.

III. PENGIRIMAN HASIL ONLINE

1. Hasil pemeriksaan diinput melalui website : <https://simpler.bblkmakassar.com>
2. Waktu pengisian hasil selambat-lambatnya tanggal :

24 Mei 2025

3. Keterlambatan penginputan hasil dapat berakibat hasil pemeriksaan laboratorium tidak dievaluasi

IV. EVALUASI

1. Evaluasi akan dilaksanakan oleh instalasi Mikrobiologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar.
2. Hasil Evaluasi akan diupload di website dan dapat diunduh sesuai dengan akun setiap peserta.

Contact Person

- **Andi Tenri Commeng (081355519370)**
- **Eka Andrianto (085298890500)**