

III.PENGISIAN LEMBAR JAWABAN SECARA ONLINE

- 1. Pengisian lembar jawaban tersedia dalam bentuk online
Via Website:[http:// simple.bblkmakassar.com/index](http://simple.bblkmakassar.com/index)
- 2. **Isi lembar hasil dengan teliti untuk menghindari kekeliruan.**Cara Pengisian lembar jawaban sebagai berikut :
 - a. Isilah tanggal penerimaan, tanggal pemeriksaan,petugas yg melakukan pemeriksaan serta pendidikannya.
 - b. Isilah metode pemeriksaan, nama reagen,beseta nama produsen , nomor lot/batch dan tanggal kadaluarsa dari reagen yang digunakan (**jika Nama Reagens tidak terdapat dalam pilihan,segera hubungi kontak person**).
 - c. Isilah hasil pemeriksaan sesuai dengan kode bahan uji yang diterima peseerta.
 - d. Jika lab saudara tidak mengerjakan pemeriksaan,pilih tidak mengerjakan pada kolom nama reagens dan isi alasan tidak mengerjakan pada kolom catatan.
 - e. Teliti kembali hasil pemeriksaan ,kemudian klik SIMPAN.
 - f. Masuk ke menu edit hasil,teliti kembali jawaban yang telah diinput.jika sudah sesuai,klik tombol KIRIM.
 - g. Masuk ke menu cetak hasil, kemudian cetak hasil input peserta.
 - h. Batas akhir pengisian,dan pengiriman jawaban paling lambat **tanggal 21 November 2025**. Apabila melewati batas waktu,maka sistim akan otomatis terkunci dan peserta tidak bisa melakukan input hasil pemeriksaan.

IV.PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN

- 1. Meliputi 2 aspek yaitu ketepatan hasil pemeriksaan dan kesesuaian strategi 3 pemeriksaan diagnostik Anti HIV
- 2. Menilai kesesuaian secara kualitatif hasil pemeriksaan peserta dibandingkan dengan nilai acuan.

KRITERIA	PENILAIAN
Nilai acuan Reaktif dilaporkan Reaktif	Benar
Nilai acuan Non Reaktif dilaporkan Non Reaktif	Benar
Nilai acuan Reaktif dilaporkan Non Reaktif	Salah
Nilai acuan Non Reaktif dilaporkan Reaktif	Salah
Nilai acuan Reaktif dilaporkan (+)	Tidak dapat dinilai
Nilai acuan Non Reaktif dilaporkan (-)	Tidak dapat dinilai

- 3. Kesesuaian Strategi 3 Pemeriksaan Anti HIV
 - Penilaian kesesuaian meliputi kesesuaian tahap pengerjaan dan kesesuaian urutan reagen yang digunakan berdasarkan sensitivitas dan spesifitas hasil evaluasi reagen HIV yang telah ditetapkan.
 - Penilaian kesesuaian strategi 3 akan tetap dilakukan meskipun tidak mempengaruhi nilai akhir.
- 4. Nilai akhir didapatkan dari penilaian sesuai kriteria diatas pada ketiga tabung cryotube dengan ketentuan :
 - Nilai baik apabila hasil pemeriksaan benar untuk ketiga tabung cryotube.
 - Nilai Tidak Baik apabila hasil pemeriksaan salah untuk satu cryotube atau lebih
 - Tidak dapat dinilai apabila laporan hasil pemeriksaan menyimpang dari ketentuan atau tidak melakukan pemeriksaan.

V. PENANGANAN SISA BAHAN UJI

Sisa bahan uji merupakan limbah infeksius dan harus diperlakukan sesuai standar penanganan limbah infeksius.

Contact Person :

Admin PME (0811-4460-5444)