

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL
PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL
MIKROSKOPIS MALARIA
SIKLUS II TAHUN 2025**



**BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
MAKASSAR**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11 Makassar 90245
Telp. 0411 586457, 586458, 586270 Fax. 0411 586270
Email : pmebblmakassar@gmail.com

I. BAHAN KONTROL

1. Bahan uji yang dikirim adalah 1 (satu) paket sediaan Malaria yang terdiri dari 10 slide yang sudah diwarnai dengan pewarnaan Giemza.
2. Perhatikan petunjuk pelaksanaan ini dengan seksama agar diperoleh hasil yang baik dan benar.
3. Sebelum melakukan pemeriksaan, perhatikan terlebih dahulu kondisi seluruh sediaan.

II. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan dilakukan pada sediaan darah tebal dan darah tipis menggunakan pembesaran 100x objektif.
2. Tanggal pelaksanaan pemeriksaan yaitu tanggal **17 – 18 November 2025**
3. **Mengisi form tanda terima bahan uji secara online** dengan cara login pada aplikasi website :
<https://simpler.bblkmakassar.com/index>
(maksimal 1x24 jam setelah bahan uji diterima)

III. INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN DAN PENGISIAN HASIL

1. Isilah terlebih dahulu tanggal penerimaan dan tanggal pemeriksaan serta ceklis kualitas bahan.
2. Isilah kolom hasil pada aplikasi dengan memilih:
 - a. Negatif atau Positif
 - b. Pilih spesies :
Plasmodium falciparum
Plasmodium vivax
Plasmodium malariae
Plasmodium ovale
Mix Plasmodium falciparum + Plasmodium vivax
Mix Plasmodium falciparum + Plasmodium malariae
Dst.
 - c. Pilih stadium: Trophozoit, Gametosit, Skizon.
 - d. Masukkan Jumlah Parasite dengan menghitung jumlah parasite per mikroliter, hitung jumlah parasite (stadium trophozoit dan skizon) dalam 200 leukosit pada sediaan darah tebal.

Jika jumlah parasite <100 dalam 200 leukosit, lakukan pembacaan jumlah parasite dalam 500 leukosit.

e. Jadi Jumlah parasite dalam 1ul darah :

Jumlah parasite x 8.000

Jumlah leukosit

3. Teliti apakah hasil telah diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan dan cara pengisiannya sudah benar.
4. Komentar/saran disediakan untuk memberikan keterangan mengenai pelaksanaan program ini, seperti kesulitan/hambatan pelaksanaan, kondisi bahan uji, dan sebagainya.

IV. PENGIRIMAN HASIL

1. Hasil pemeriksaan diinput melalui website <https://simpler.bblkmakassar.com/index>
2. Waktu pengisian hasil selambat-lambatnya tanggal :
21 November 2025
3. Keterlambatan penginputan hasil dapat berakibat hasil pemeriksaan laboratorium tidak dievaluasi

V. EVALUASI

1. Evaluasi akan dilaksanakan oleh instalasi Mikrobiologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar.
2. Hasil Evaluasi akan diupload di website dan dapat diunduh sesuai dengan akun setiap peserta.

Contact Person

Admin PME (0811-4460-5444)