



PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL URINALISA SIKLUS I TAHUN 2023

PENYELENGGARA :

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11 Tamalanrea Makassar 90245

Email : pmebbblkmakassar@gmail.com

Website : <https://simpler.bblkmakassar.com>

1. BAHAN UJI

Bahan uji yang dikirim merupakan bahan uji urine dalam bentuk cairan yang terdiri dari 2 (dua) botol untuk tiap siklus dengan kode bahan yang berbeda dan dikerjakan pada tanggal yang sama.

2. STABILITAS DAN PENERIMAAN BAHAN UJI

- Bahan uji yang diterima diperiksa secara visual, dan segera simpan pada suhu 2°-8°C (Lemari Es). Jika bahan uji yang diterima rusak/tidak laik segera laporkan kepada penyelenggara.
- Tanda terima bahan uji dilakukan secara Online melalui aplikasi <https://simpler.bblkmakassar.com/index> segera setelah bahan uji diterima.
 - Login dengan memasukkan E-mail address dan password
 - Pilih hasil pemeriksaan
 - Pilih tanda terima bahan
 - Isi tanggal terima bahan, nama penerima bahan uji, ketersediaan juklat dan kode

- bahan uji yang diterima, kondisi bahan uji ketika diterima.
- Pilih simpan

PERHATIAN

Bahan uji berasal dari manusia, oleh karena itu bahaya terinfeksi dapat terjadi. Kerjakan secara hati-hati dengan memperhatikan teknik-teknik keamanan kerja laboratorium.

3. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- Bahan diperiksa setelah dikeluarkan dari lemari es, diamankan selama 30 menit pada suhu kamar.
- Homogenkan urine dengan cara botol dibolak-balik beberapa kali sehingga isi dalam botol tercampur dengan sempurna. Jangan dikocok agar tidak terjadi busa.
- Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan parameter yang tertera dalam input hasil dengan menggunakan metode pemeriksaan dan alat yang biasa dilakukan di laboratorium saudara dan diperlakukan sama seperti sampel sehari-hari.

4. CARA DOWNLOAD PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGISIAN HASIL ONLINE PNPME

Petunjuk pelaksanaan dapat di download di aplikasi <https://simpler.bblkmakassar.com/index>

- Login dengan memasukkan E-mail Address dan password
 - Pilih Download
 - Pilih Download Manual book dan Juknis → Download Juklak → pilih bidang yang diikuti (**Untuk Petunjuk Pelaksanaan**)
 - Pilih Download Manual Book dan Juknis → Download Manual Book Input Hasil → pada Bidang yang diikuti (**Untuk Pengisian Hasil Online**)
- Ketentuan mengisi hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Hasil pemeriksaan parameter pH dan BJ berupa data kuantitatif.
 - Hasil pemeriksaan parameter Protein, Glukosa, Billirubin, Urobilinogen, Darah,

- Keton dan Lekosit berupa data semi kuantitatif (+5, +4, +3, +2, +1 dan negatif)
- Hasil pemeriksaan parameter Nitrit dan Test Kehamilan berupa Data Kualitatif (positif atau negatif).
 - Bila ada komentar dan saran, dapat ditulis dibawah kolom CATATAN
 - Teliti apakah hasil yang diisi sudah benar dan sesuai dengan cara penginputan hasil.
 - Hasil yang sudah terkirim ke penyelenggara kemudian di cetak untuk sebagai bukti telah melakukan penginputan hasil.

5. WAKTU PELAKSANAAN

Bahan uji diperiksa secara serentak oleh semua laboratorium peserta pada tanggal :

15-17 Mei 2023

6. WAKTU PENGISIAIN HASIL ONLINE

- Waktu pengisian hasil online selambat-lambatnya tanggal :
- Keterlambatan pengisian hasil berakibat hasil pemeriksaan saudara tidak dapat dievaluasi

20 Mei 2023

7. CARA PENILAIAN

- Masing-masing data hasil semua parameter ditentukan nilai tergetnya (modus) dari nilai konsensus.
- Hasil peserta dibandingkan dengan nilai target, dihitung skornya berdasarkan tingkatan masing-masing.

PAREMATER	SKOR
pH dan Berat Jenis	4 : hasil benar
	3 : hasil selisih 1 tingkat
	2 : hasil selisih 2 tingkat
	1 : hasil selisih 3 tingkat
	0 : hasil selisih >3 tingkat
Protein, Glukosa, Billirubin, Urobilinogen, Darah, Keton dan Lekosit	4 : hasil benar
	3 : hasil selisih 1 tingkat
	2 : hasil selisih 2 tingkat
	1 : hasil selisih >2 tingkat
	0 : hasil salah
Nitrit dan Tes Kehamilan	4 : hasil benar
	0 : hasil salah

Kriteria Nilai :

Nilai > 3.00 = Baik
Nilai 2.01-3.00 = Cukup
Nilai 1.01 – 2.00 = Kurang
Nilai ≤ 1.00 = Buruk

8. EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dan hasil evaluasi bisa diunduh pada aplikasi <https://simpler.bblkmakassar.com/index>

9. BANDING HASIL

Banding Hasil dilakukan maksimal 14 (empat Belas) hari setelah Hasil Evaluasi telah terbit pada Aplikasi.

CONTACT PERSON :

Arraz Kartanegara, S.Farm
0811463005